

Produktspezifikation

Produktname

Alchesan Fläche 80R

Version: 09.09.21

Desinfektionsmittellösung für Flächen bis 2m²

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionsmittellösung für Flächen bis 2m² mit schneller und rückstandsfreier Abtrocknung. Es werden keine Duft- oder Farbstoffe verwendet, außerdem ist das Mittel frei von Parabenen und Silikonen.

BAuA Reg Nr.: N-97812

UFI Code: GMQ7-6DR2-M20C-YY8P

Wirkstoff

73,4 g/100g Ethanol; 80 %(v/v)

Wirksamkeit

Mikrobiologische Wirksamkeit	Einwirkzeit	gemäß
✓ bakterizid	1 Minute	EN 13727
✓ levurozid	1 Minute	EN13624
✓ begrenzt viruzid	1 Minute	EN 14476
✓ begrenzt viruzid PLUS	1 Minute	EN 14476
✓ viruzid	15 Minuten	EN 14476

Die vorliegenden Gutachten können beim Hersteller angefordert werden.

Listungen



VAH-gelistet

Alchesan Fläche 80R ist gelistet in der VAH-Desinfektionsmittelliste.



Alchesan Fläche 80R ist gelistet IHO-Desinfektionsmittelliste.

Hautverträglichkeit



Unsere Alchesan Desinfektionsmittel wurden von Dermatologen auf Ihre Hautverträglichkeit getestet. Die Rezeptur von Alchesan Fläche 80R hat mit dem Testurteil „sehr gut“ abgeschnitten.

Produktspezifikation

Produktname

Alchesan Fläche 80R

Version: 09.09.21

Desinfektionsmittellösung für Flächen bis 2m²

Anwendung

Wischdesinfektion:

Anwendung ohne spezifisches Tuch:

Produkt mit getränktem Tuch auf vorgereinigte, alkoholbeständige Flächen bis 2 m² oder alkoholbeständige Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung unverdünnt auftragen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit 1 Minute

Sprühdesinfektion:

Vorgereinigte, alkoholbeständige Flächen bis 2 m² oder alkoholbeständige Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung unverdünnt einsprühen (maximal 50ml je m²), nicht mittels Tüchern verteilen und vollständig abtrocknen lassen.

Verpackungseinheit

0,5 L Flasche	Art.Nr. 831 160
0,75 L Sprühflasche	Art.Nr. 831 170
1,0 L Flasche	Art.Nr. 831 180
3 L Kanister	Art.Nr. 831 109
10 L Kanister	Art.Nr. 831 111

Physikalisch-chemische Daten:

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	5,0-7,0

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Bei Umfüllen: Behälter und zu befüllende Anlage erden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Verursacht schwere Augenreizung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei Brand: Alkohol-beständigen Schaum zum Löschen verwenden.

Lagerung:

An einem gut belüfteten Ort bei Raumtemperatur aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Weiterführende Hinweise:

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Produktetikett und Datenblatt lesen.

Produktspezifikation

Produktname

Alchesan Fläche 80R

Version: 09.09.21

Desinfektionsmittellösung für Flächen bis 2m²

Anwendungsbeispiele Alchesan Flächendesinfektion

Waschbecken	Ja
Toilette / Urinal	Ja
Armaturen	Ja
Spiegel	Ja
rutschhemmende Sicherheitsfliesen (R9-R13)	Ja
Fliesenböden / Wände	Ja
Feinsteinzeug Belag	Ja
Terrazzo / Betonstein	Ja
Granit	Ja
Marmor	Ja
Glasoberflächen	Ja
Holzoberflächen (lackiert oder beschichtet)	Ja
Kunststoffoberflächen (z.B. Resopal)	Ja
Edelstahl / Niro	Ja
Metalleinrichtungen (z.B. Türklinken)	Ja
Metall lackiert (z.B. Heizkörper, Fensterbänke)	Ja
PVC beschichtet	Ja
Flächen über 2m ²	Nein
Holzoberflächen (geölt oder roh)	Nein
Gummi / Kautschuk	Nein
Linoleum	Nein
Teppich	Nein
Kunstleder / Leder	Nein
Acrylglas	Nein

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Wir geben Empfehlungen zum Einsatz oder zur Anwendung unserer Produkte nach bestem Wissen und nach Treu und Glauben; gleichwohl enthalten sie weder eine Garantie über Produkteigenschaften noch die Übernahme einer Einstandsverpflichtung für einen bestimmten Erfolg beim Einsatz unserer Produkte; soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.

Testen Sie die vertäglichkeit unseres Flächendesinfektionsmittels vorab an einer unauffälligen Stelle.

Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.